

## **Kintex – Hlezenní bandáž - 8903**

Kintex hlezenní bandáž nabízí pohodlné upevnění díky nastavitelným suchým zipům a šněrováním, navíc přispívá k udržení tělesného tepla a poskytuje optimální podporu a ochranu pro váš kotník a nohu.

### **Použití:**

- Bolest kotníku
- Záněty slizničních vaků
- Artritida
- Záněty šlachových pochev
- Střední až těžké výrony
- Nestabilita

### **Aplikace:**

Navlékněte bandáž jako punčochu přes nohu a zašněrujte. Dbejte na správné umístění paty. Popruhy překřížte pod chodidlem a upevněte je suchým zipem na boku nohy. Nyní upevněte zapněte popruh kolem kotníku suchým zipem.

### **Doporučení:**

Před použitím výrobku se vždy poradte s lékařem! Výrobek se nesmí používat za žádných okolností:

- na otevřené rány
- při poruchách krevního oběhu
- při kožních onemocněních
- nebo při alergických reakcích na některý z materiálů

Pokud se při nošení výrobku objeví podráždění kůže nebo jiné nežádoucí účinky, okamžitě přestaňte výrobek používat a poradte se s lékařem.

### **Materiál:**

50% nylon, 42% neopren, 8% elasthan

Pokyny pro praní:

Před praním zapněte suché zipy. Bandáž perte v pračce na max. 30 °C na šetrný cyklus. Bandáž sušte rozloženou. Bandáž se nesmí sušit v sušičce!

Výrobce:

Apaloo UG

Sunthausenstr. 5, 78609 Tuningen

Tel: +49 7464 980282, Fax: +49 7420 521619