

Kintex – Infrapatelární páska - 6744

Páska Kintex na šlachy česky nabízí pohodlné nošení díky plynule nastavitelnému zapínání na suchý zip. Ten umožňuje variabilní tlak na šlachu česky. Páska pomáhá udržovat tělesné teplo a poskytuje optimální podporu a ochranu českové šlachy.

Použití:

- bolest v oblasti česky
- bursitida
- artritida
- zánět šlach
- nestabilita
- skokanské koleno

Nasazení pásky:

Přiložte bandáž pod česku a upevněte pomocí suchého zipu.

Doporučení:

Před použitím výrobku se vždy poradte s lékařem! Výrobek se nesmí používat za žádných okolností:

- na otevřené rány
- při poruchách krevního oběhu
- při kožních onemocněních
- nebo při alergických reakcích na některý z materiálů

Pokud se při nošení výrobku objeví podráždění kůže nebo jiné nežádoucí účinky, okamžitě přestaňte výrobek používat a poradte se s lékařem.

Materiál:

35% neopren, 40 % nylon, 15% EVA, 10% polyester

Pokyny pro praní:

Před praním zapněte suché zipy. Bandáž perte v pračce na max. 30°C na šetrný cyklus. Bandáž sušte rozloženou. Bandáž se nesmí sušit v sušičce!

Výrobce:

Apaloo UG

Sunthausenstr. 5, 78609 Tuningen

Tel: +49 7464 980282, Fax: +49 7420 521619

E-Mail: info@kintex.de

Web: www.kintex.de