

## UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA



## Ovation Gen 2 Walker

**PŘED POUŽITÍM SI PROSÍM PEČLIVĚ PŘEČTĚTE NÁSLEDUJÍCÍ INSTRUKCE. SPRÁVNÉ POUŽITÍ JE KLÍČOVÉ PRO SPRÁVNÉ FUNGOVÁNÍ VÝROBKU.**

## ZAMÝŠLENÉ POUŽITÍ / INDIKACE

Pneumatická ortéza s pomocí stlačeného vzduchu poskytuje podporu pro stabilní zlomeninu nohy a/nebo kotníku, poranění měkkých tkání a je vhodná i pro pooperační použití. Účinné při hojení zlomenin a k léčbě edémů (otoků).

## VAROVÁNÍ A BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Nepřepínajte vzduchové vaky. Nesprávné nafouknutí vzduchových vaků může způsobit výrazné podráždění kůže, zejména u lidí s diabetickou neuropatií. Často kontrolujte, zda na pokožce nejsou „horká místa“ a zda se neobjevily známky podráždění. Pokud zaznamenáte jakékoli kožní změny nebo pocity nepohodlí, snižte nafouknutí vzduchového vaku. Nepoužívejte tuto pomůcku, pokud je vaše noha znečitlivěná, ať už v důsledku anestézie, nervových, kožních nebo jiných problémů.

Tento výrobek není určen k použití přímo na otevřenou ránu nebo poraněnou pokožku. Pokud se objeví bolest a/nebo necitlivost, okamžitě kontaktujte svého lékaře.

Při chůzi na mokřem nebo kluzkém povrchu buďte opatrní, aby nedošlo ke zranění.

Před provedením změn v nastavení se vždy poraďte se svým lékařem nebo fyzioterapeutem. Tento výrobek smí být používán pouze pod dohledem lékaře. Toto zařízení není určeno pro veřejné použití bez dozoru.

## Velikosti

XS	S	M	L
34-36	37-39	40-44	45-47


## MATERIÁL

Rám ortézy je vyroben speciálně z nylonu vyztuženého skleněnými vlákny. Vložka je vyrobena z pěny s otevřenými buňkami a kartáčovaného nylonu. Bez přidaného latexu.


## POKYNY PO APLIKACI




1. Odepněte pásy na suchý zip a vyjměte z boty vnitřní měkkou vložku.

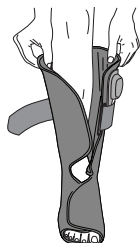


2. Otevřete měkkou vložku a vložte nohu dovnitř tak, aby patní část těsně přiléhala k zadní části vložky. Připevněte a omotejte chodidlové části kolem chodidla, poté nožní část vložky kolem nohy. Ujistěte se, že vložka sedí pevně, ale neomezuje. Část pro nafukování by měla mířit směrem ven.

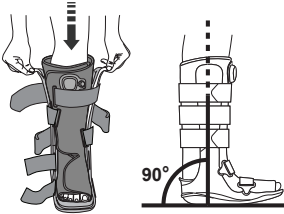


3. Jemně roztáhněte boční výztuhy a položte dolní část nohy do ortézy, aniž byste tahali za vytahovací poutka. Kotník by měl být vycentrován mezi výztuhami a hodidlo s kotníkem by měly být v úhlu 90°.

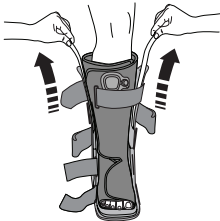


4. Jakmile je noha správně zarovnána, vyjměte vytahovací poutka a jemně zatlačte výztuhy směrem k vložce, aby se suchý zip připnul na vložku ortézy.

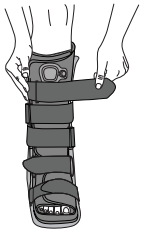

5. Zapněte pásy na suchý zip počínaje palcem na noze a poté směrem nahoru po noze. Vyvarujte se přílišnému utažení ortézy. Vzhledem k tomu, že se velikost otoku může během dne měnit\*, může být nutné během dne upravovat utažení pásů pro větší pohodlí.  
\* V závislosti na aktivitě, odpočinku atd.

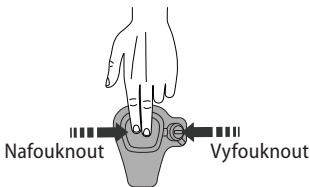

6. Vzduchovou vložku nafouknete stisknutím a uvolněním středového tlačítka, dokud vložka nebude fungovat jako pohodlný polštář a poskytovat dostatečnou podporu. Vyvarujte se přílišnému nafouknutí. Vyfouknout vzduchovou vložku nebo přizpůsobit tlak můžete stisknutím menšího tlačítka vedle tlačítka pro nafukování.

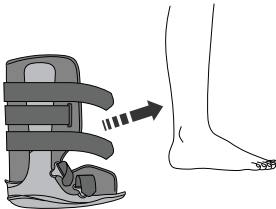

7. Chcete-li ortézu sundat, jednoduše rozepněte pásy, aniž byste je museli ze smontované ortézy úplně sundat. Odepněte měkkou vložku a opatrně vytáhněte chodidlo a kotník dopředu a ven z ortézy. Pokud chcete ortézu znovu nasadit, vložte nohu a kotník do vložky a znovu zapněte suchý zip (podle obr. 5).





SPRZĘT  
MEDYCZNY

**Výrobce:**

mdh sp. z o.o.  
ul. Ks. W. Tymienieckiego 22/24  
90-349 Łódź  
tel. +48 42 674 83 84  
fax. +48 42 676 71 85  
[www.mdh.pl](http://www.mdh.pl), [www.qmedinfo.pl](http://www.qmedinfo.pl)

**Distributor:**

MEYRA ČR s.r.o.  
Hrusická 2538/5  
141 00 Praha 4  
Česká republika  
[www.meyra.cz](http://www.meyra.cz)