

protect. Collar tracheo

Informace o účelu použití

Výrobek protect.Collar tracheo je krční límec. Výrobek je určen výhradně k ortotické terapii hrudní páteře, pokožka v oblasti přiložení ortézy nesmí být poškozena nebo poraněná.

Indikace

- Jednoduché a stabilní fraktury
- Postoperativně po luxacích / luxačních frakturách
- Degenerativní poruchy
- Imobilizace po traumatu / po operaci
- Spinální stenóza
- Sklouznutí obratle (spondylolistéza)

Kontraindikace

V současné době nejsou žádné známy.

Použití

1. Zadní část ortézy označenou „back“ přiložte ze zadu ke krku.
2. Přední část ortézy označenou „front“ přiložte ventrálně na krk tak, aby se částečně překrývala se zadní částí a aby brada dosedla do příslušného vybrání.
3. Upevněte pásek.

Pro krční manžetu se musejí změřit dvě velikosti takto:

Výška:

Změřte vertikální odstup mezi bradou a hrudní kostí pacienta (obr. A). Tato změřená hodnota odpovídá VÝŠCE krční manžety. Pohybuje-li se změřená hodnota mezi dvěma po sobě jdoucími velikostmi, vyzkoušejte nejdříve menší velikost.

Obvod:

Změřte obvod krku pacienta (obr. B). Tato změřená hodnota odpovídá OBVODU krční manžety.

Pokyny k praní

Pásky na suchý zip před praním zapněte. Zbytky mýdla mohou způsobit podráždění kůže a vést k opotřebení materiálu. Výrobek lze nosit a používat jak ve sladkých tak i ve slaných vodách. Po použití ve vodě výrobek řádně vypláchněte v čisté vodě.

- Výrobek perte v ruce a nejlépe za použití pracího prostředku medi clean.
- Nebělit
- Sušit na vzduchu.
- Nežehlit.
- Chemicky nečistit.



Pokyny pro skladování

Výrobku skladujte na suchém místě chráněném před přímými slunečními paprsky.

Materiálové složení

Polyetylenová pěna

Záruka

Jsou v rámci zákonných ustanovení.

Likvidace

Dosloužilý výrobek můžete odstranit s komunálním odpadem.