

Návod k použití ortéza zápěstí s fixací palce 301T

Děkujeme, že jste si vybrali naši ortézu. Tento návod vám pomůže ortézu správně používat.

Informace o účelu použití

Tato ortéza je navržena pro fixaci a stabilizaci zápěstí a palce, aby poskytla potřebnou podporu a ulevila od bolesti.

Indikace:

Lehké úrazy zápěstí (kontuze, distorze), doléčení po zlomeninách po sejmutí pevné fixace, bolesti při artritidách a artróze zápěstí, entezopatie a záněty šlach v oblasti zápěstí

Kontraindikace:

V současné době nejsou známy.

Před použitím ortézy si přečtěte všechny bezpečnostní pokyny:

- Nepoužívejte ortézu na otevřené rány nebo podrážděnou pokožku.
- Pokud pocítíte bolest, nepohodlí nebo jiné nežádoucí účinky, přestaňte ortézu používat a poradte se s lékařem.

Pokyny k nasazení / sundání

Před prvním použitím zkontrolujte, zda je ortéza čistá a nepoškozená.

Ujistěte se, že máte ortézu určenou pro správnou ruku (levou nebo pravou).

Nasazení:

1. Uvolněte suché zipy ortézy tak, abyste ji mohli snadno nasadit na zápěstí a palec.
2. Vložte ruku do ortézy tak, aby palec prošel otvorem pro palec a zápěstí bylo opřeno o spodní část ortézy, kde se nachází anatomicky tvarovaná dlahu.
3. Postupně zapněte suché zipy kolem zápěstí a pak obeptejte zápěstí dlouhým elastickým páskem. Upravte utažení podle potřeby tak, aby ortéza pevně držela na místě, ale zároveň neomezovala krevní oběh.
4. Nakonec uzpůsobte suchý zip kolem palce tak, aby byl palec dostatečně pevně uchycen, případně upravte duralovou dlahu pro optimální úhel palce.

5. Po nasazení a utažení ortézy zkontrolujte, zda je ruka pohodlně upevněná a ortéza poskytuje potřebnou podporu.



Odložení ortézy:


Chcete-li ortézu odložit, rozepněte suché zipy a sejměte ji. Pak zipy zapněte, čímž prodloužíte jejich životnost.

Údržba a čištění:

- Používejte jemný prací prostředek a doporučujeme sítku na praní.
- Zapněte všechny suché zipy.
- Výrobek nikdy nevystavujte přímému působení tepla/chladu. Respektujte pokyny k péči uvedené na všité etiketě na horním okraji produktu.
- Pravidelná péče zaručuje optimální účinek.
- Perte v ruce nebo v pračce při teplotě 30°C.
- Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky nebo bělidla.
- Nežehlete a nesušte v sušičce.

Skladování

Ortézu skladujte na suchém a chladném místě mimo dosah přímého slunečního světla. Zabraňte deformaci ortézy tím, že ji nebudete skládat nebo přetěžovat.

	SANOMED, spol. s r.o. Palackého třída 240/75 612 00 Brno Czechia	 Medical Device (Zdravotnický prostředek) Materiálové složení: Polyamid, Elastan, dural	Ohlašovací povinnost: Závažné nežádoucí příhody, definované ve článku 2 (č. 65) nařízení (EU) 2017/745 (MDR), je třeba nahlásit výrobci a příslušnému úřadu členského státu.
--	--	---	--