

Návod k použití – infrapatelární páska 506

Děkujeme, že jste si vybrali naši bandáž. Tento návod vám pomůže ortézu správně používat.

Informace o účelu použití

Tato bandáž je navržena pro stabilizaci česky a zmírnění napětí na šlachy kolene.

Indikace:

Patelární syndrom (hyperprese, lehké subluxace, chondropatie), entezopatie v oblasti pately.

Kontraindikace:

V současné době nejsou známy.

Před použitím bandáže si přečtěte všechny bezpečnostní pokyny:

- Nepoužívejte bandáž na otevřené rány nebo podrážděnou pokožku.
- Pokud pocítíte bolest, nepohodlí nebo jiné nežádoucí účinky, přestaňte bandáž používat a poraďte se s lékařem.

Pokyny k nasazení / sundání

Před prvním použitím zkontrolujte, zda je bandáž čistá a nepoškozená.

Ujistěte se, že máte správnou velikost bandáže.

Nasazení:

1. Bandáž lze nosit na levém i pravém koleni.
2. Uvolněte suché zipy a navlékněte bandáž na koleno.
3. Umístěte pelotu pod střed česky.
4. Zapněte suché zipy nad kolenem.
5. Utáhněte pásku pod kolenem tak, abyste vytvořili požadovaný tlak na patelární šlachy. Tlak si můžete individuálně přizpůsobovat, nesmí to být přítom nepříjemné.



Odložení bandáže:



- Rozepněte suché zipy a sejměte bandáž.
- Zapněte suché zipy pro delší životnost bandáže.

Údržba a čištění:

- Používejte jemný prací prostředek a doporučujeme síťku na praní.
- Zapněte všechny suché zipy.
- Výrobek nikdy nevystavujte přímému působení tepla/chladu. Respektujte pokyny k péči uvedené na všité etiketě na horním okraji produktu.
- Pravidelná péče zaručuje optimální účinek.
- Perte v ruce nebo v pračce při teplotě 30°C.
- Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky nebo bělidla.
- Nežehlete a nesušte v sušičce.

Skladování

Bandáž skladujte na suchém a chladném místě mimo dosah přímého slunečního světla. Zabraňte deformaci ortézy tím, že ji nebudete skládat nebo přetěžovat.

	SANOMED, spol. s r.o. Palackého třída 240/75 612 00 Brno Czechia	 Medical Device (Zdravotnický prostředek) Materiálové složení: Neopren, Polyamid, Polyester	Ohlašovací povinnost: Závažné nežádoucí příhody, definované ve článku 2 (č. 65) nařízení (EU) 2017/745 (MDR), je třeba nahlásit výrobci a příslušnému úřadu členského státu.
--	--	---	--